

厌氧培养箱 YQX-I/II 型

YQX-I/YQX-II Anaerobic Incubator

中华人民共和国医疗器械注册证编号


沪械注准 20172220451

● 适用范围 Scope of application

厌氧培养箱供医疗机构用于厌氧菌的培养。



YQX-I 型

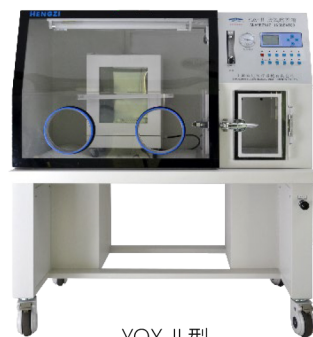

YQX-II 型

● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 该产品由恒温培养箱、厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架、瓶架、熔蜡消毒器等部分组成。可在操作室内形成稳定的厌氧环境，专为厌氧微生物的培养所设计。
- ★ 采用微电脑智能 PID 温度控制器，能准确反映及控制培养箱内温度。
- ★ 箱内装有紫外线杀菌灯。
- ★ 恒温培养箱内箱材质 SUS304 不锈钢。
- ★ 操作室、取样室前窗采用耐冲击特种透明玻璃板制成，操作时使用专用手套可靠舒适、灵活、使用方便
- ★ 操作室内备有特殊接种棒灭菌器、熔蜡消毒装置、除氧催化器。
- ★ 独立的外置温度保护装置。
- ★ 符合 GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。
- ★ 通过 GB 4824 工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性限值 and 测量方法 1 组 B 类 检测。

● 型号规格 Model specifications

型号	YQX-I	YQX-II
培养室温度范围	室温 +3℃至 50℃	
温度均匀度	≤ ±1℃	
温度波动度	≤ ±0.3℃	
厌氧等级	含氧量≤ 1%	
取样室形成厌氧状态时间	≤ 5 分钟	
取样室形成厌氧方式	真空 + 气体置换式 (99.99% 氮气 或 氢气 5% 二氧化碳 10% 氮气 85% 组成的混合气)	
操作室形成厌氧状态时间	≤ 1 小时	
操作室形成厌氧方式	气体置换式 (99.99% 氮气 或 氢气 5% 二氧化碳 10% 氮气 85% 组成的混合气) + 微流量控制	
操作室厌氧环境维持时间	在停止补充微量混合气体的情况下 > 12 小时	
厌氧形成控制方式	手工，按键操作	
培养室内部尺寸 W*D*H (cm)	25×19.4×28.5	
培养室内部容积 (L)	13	
取样室尺寸 W*D*H (cm)	33×23×32	
操作室尺寸 W*D*H (cm)	81.4×66.4×66.8	
外形尺寸 W*D*H (cm)	120×73×137	
温度控制器	LED 数码管显示 PID 温度控制器	LCD 液晶屏显示 PID 温度控制器
搁板	2	2
功率 (W)	730	
电源	1Ø 220V 50Hz	
备注	※ 外部高度 (H) 含 16.5cm 配件 ※ 客户需自备实验用气瓶、气体、减压阀及催化剂	